



synergEyes®

υβριδικοί φακοί επαφής για κερατόκωνο

Επαναφέροντας όραση. Αλλάζοντας ζωές.

πληροφορίες για ασθενείς με κερατόκωνο



Μοιράζοντας το Όραμα

Εάν έχετε κερατόκωνο, μία εξελισσόμενη κατάσταση των ματιών στην οποία ο κερατοειδής λεπταίνει και γίνεται κωνικός στην μορφή και ανώμαλος αντί για σφαιρικός όπως είναι φυσιολογικά, η ανάγκη σας να βρείτε μία λύση που μπορεί να διορθώσει το θάμβος και την παραμορφωμένη όραση, με ένα άνετο, υγιή και πρακτικό τρόπο είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η SynergEyes, Inc μοιράζεται το όραμά σας. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μία σειρά υβριδικών φακών επαφής που παρέχουν πρωτοφανή χαρακτηριστικά και οφέλη στην αντιμετώπιση του κερατόκωνου. Οι φακοί της εταιρείας SynergEyes® εκπροσωπούν το ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η τεχνολογία - επιτρέποντας σας να ζείτε μία παραγωγική ζωή με σταθερή, υγιή όραση στην οποία μπορείτε να βασίζεστε.



Η SynergEyes® αξιοποιεί επαναστατική υβριδική τεχνολογία, συνδυάζοντας τις καλύτερες ιδιότητες των δύο κόσμων - τη διαυγή όραση ενός υψηλής οξυγόνωσης σκληρού αεροδιαπερατού (RGP) φακού επαφής με την ολοήμερη άνεση και ευκολία χρήσης ενός μαλακού φακού επαφής. Κανένας άλλος φακός επαφής, προς το παρόν, δεν προσφέρει όλα αυτά τα προνόμια μαζί.

Τι κάνει τη SynergEyes διαφορετική;

Ανεξάρτητα από το στάδιο του κερατόκωνου από το οποίο πάσχετε, υπάρχει επιτέλους ένας εξατομικευμένος σχεδιαστικά φακός επαφής που προσφέρει τα πλεονεκτήματα των μαλακών και σκληρών φακών επαφής χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα. Οι φακοί της SynergEyes είναι ο άνετος τρόπος για διαυγή όραση.

Οι μαλακοί φακοί επαφής γενικώς δε μπορούν να διορθώσουν επαρκώς τις ανωμαλίες ενός κερατοκωνικού ματιού. Καθώς ο κερατόκωνος επιδεινώνεται, η επιτυχή διόρθωση με μαλακούς φακούς επαφής περιορίζεται ακόμα περισσότερο, καθιστώντας τους RGPs ως τη μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη επιλογή φακών επαφής για τα περισσότερα άτομα με κερατόκωνο.

Ενώ οι RGPs παρέχουν καλύτερη όραση από τους μαλακούς φακούς, προκαλούν δυσανεξία, είναι πολύπλοκοι στη χρήση και φτωχά κεντραρισμένοι. Οι φακοί της SynergEyes παρέχουν καλύτερη άνεση, παραμένουν καλά κεντραρισμένοι και εξαλείφουν το πρόβλημα ερεθιστικών εναποθέσεων που μπορούν να συγκεντρωθούν κάτω από τους RGPs.

Ανεξάρτητα από τις καθημερινές δραστηριότητες και τον ενεργητικό τρόπο ζωής σας, δε θα βιώνετε πλέον υπερβολική κίνηση ή μετατόπιση των φακών επαφής. Και δε χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα φύγουν από το μάτι στις πιο ακατάλληλες στιγμές.

Πολύ συχνά οι επαγγελματίες οφθαλμικής υγείας εφαρμόζουν RGP φακούς πάνω από μαλακούς φακούς για να παρέχουν μεγαλύτερη άνεση και αυξημένο χρόνο χρήσης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι πιο επιτυχής από μαλακούς ή RGP φακούς όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, όμως λόγω της πολυπλοκότητας των χειρισμών και της φροντίδας, των πιθανών επιπλοκών στην υγεία του ματιού, και της δυσκολίας κεντραρίσματος, τα ποσοστά επιτυχίας είναι σημαντικά μειωμένα.

Είτε φοράτε παραδοσιακούς μαλακούς ή σκληρούς φακούς επαφής, ή εάν φοράτε και τους δύο ταυτόχρονα, οι πιθανότητες είναι να έχετε βιώσει ...

- Ανεπαρκής, ασταθής όραση
- Ενόχληση
- Μετατόπιση/απώλεια του φακού
- Μειωμένο χρόνο χρήσης του φακού
- Φωτοφοβία και σκέδαση
- Πολυπλοκότητα στη χρήση
- Ανεπαρκής οφθαλμική υγεία



Εκεί που η Τεχνολογία συναντά την Όραση

Τώρα, μία τεχνολογικά επαναστατική εξέλιξη σας απαλλάσσει από τους συμβιβασμούς του παρελθόντος. Οι υβριδικοί φακοί επαφής της SynergEyes παρέχουν χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που καμία άλλη επιλογή δεν μπορεί να προσφέρει:

- **Σκληρό αεροδιαπερατό κέντρο** παρέχει ευκρινή, διαυγή όραση
- **Μαλακή περιφέρεια** παρέχει τέλειο κεντράρισμα και ολοήμερη άνεση
- **Υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου και ροή δακρύων** παρέχουν άριστη υγεία στον οφθαλμό
- **Πατενταρισμένη HyperBond™ σύνδεση** παρέχει μία πολύ δυνατότερη σύνδεση από προηγούμενους υβριδικούς φακούς επαφής.

Ανεξαρτήτως του σταδίου του κερατόκωνου από το οποίο πάσχετε, η SynergEyes έχει ένα φακό για εσάς!

Οδηγίες για Εισαγωγή:

Πριν εισάγετε τους φακούς σας, πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι χωρίς λανολίνη και στεγνώστε τα με μία καθαρή πετσέτα που δεν είναι λινή.


- Γεμίστε το φακό με φυσιολογικό ορό χωρίς συντηρητικά καθώς τον κρατάτε οριζοντίως σε μία DMV® βάση εισαγωγής. Η σταθεροποιώντας τον φακό μεταξύ του αντίχειρα και μέσου δάχτυλου (DMV® βάση εισαγωγής μπορείτε να προμηθευτείτε από τον επαγγελματία οφθαλμικής υγείας που σας παρακολουθεί).



- Είναι κρίσιμο να γεμίσετε την κοιλότητα του φακού πλήρως μέχρι την ΚΟΡΥΦΗ με όρο για να αποφύγετε την εισαγωγή φυσαλίδων αέρα. Η DMV βάση εισαγωγής επιτρέπει στον πλήρως γεμισμένο φακό να είναι καλά ισορροπημένος ώστε να μπορείτε με ευκολία να τον τοποθετήσετε στο μάτι. Θα γνωρίζετε εάν έχετε φυσαλίδα αέρα μετά την εισαγωγή εάν αντιληφθείτε μία παραμόρφωση στην περιφερειακή σας όρασης.



- Σκύψτε μπροστά και ακουμπήστε το σαγόνι στο στήρνο σας. Η μύτη σας πρέπει να είναι κάθετη στο πάτωμα. Μπορεί να είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε έναν καθρέφτη επίπεδα στο τραπέζι ώστε να βλέπετε καθώς εισάγετε το φακό.

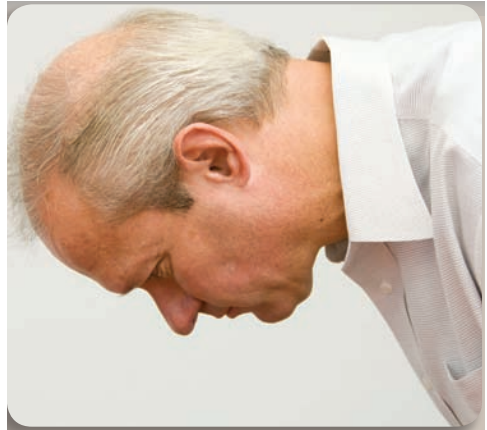

- Τραβήξτε προς τα πάνω το άνω βλέφαρο τοποθετώντας τα δάχτυλα στη βάση των βλεφαρίδων. Τραβήξτε προς τα κάτω το κάτω βλέφαρο με τον παράμεσο του χεριού που κρατάει το φακό, και εισάγετε το φακό.



- Καθώς το υγρό μετατοπίζεται, ο φακός θα εγκατασταθεί ήπια στην επιφάνεια του οφθαλμού. **ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΑΤΙ.**



Οδηγίες για Αφαίρεση:

Μη βάλετε λιπαντικές σταγόνες ή υγρό εντός του ματιού πριν την αφαίρεση του. Είναι σημαντικό να είστε σίγουροι ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τους φακούς σας. Αυτό θα βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα αδράγματος των δαχτύλων στην άκρη του φακού.

- Δημιουργήστε μικρή σχισμή με τον αντίχειρα και δείκτη σας και περιστρέψτε το χέρι σας έως ότου ο κύκλος είναι κάθετα.
- Κοιτώντας ευθεία μπροστά, ή ελαφρώς προς τα πάνω, τοποθετήστε το μαλακό μέρος των δαχτύλων σας στην κατώτερη άκρη της μαλακής περιφέρειας του φακού, στην 6η ώρα.
- Χρησιμοποιώντας το μαλακό μέρος των δαχτύλων, όχι τα νύχια, εφαρμόστε ένα αρκετό σθεναρό τσίμπημα για να αναγκάσετε την άκρη του φακού να διπλώσει. Αυτό επιτρέπει αέρα να εισέλθει κάτω από τη μαλακή περιφέρεια με αποτέλεσμα να ελευθερωθεί ο φακός από την επιφάνεια του ματιού. Τραβήξτε αργά την κάτω άκρη του φακού μακριά από το μάτι σας.
- Εάν τα δάχτυλα υγραθούν από την αφαίρεση του πρώτου φακού, **σιγουρευτείτε να τα στεγνώσετε πλήρως ξανά πριν την αφαίρεση του άλλου φακού.**



• Δώστε στα μάτια σας χρόνο να προσαρμοστούν:

Επειδή οι φακοί της SynergEyes® είναι διαφορετικοί από άλλους φακούς που έχετε χρησιμοποιήσει, ενδέχεται να υπάρξει μία περίοδος προσαρμογής. Ο επαγγελματίας οφθαλμικής υγείας που σας παρακολουθεί μπορεί να σας εξηγήσει τι να αναμένετε.

• Είναι σημαντικό να αυξήσετε το χρόνο χρήσης σας:

Ξεκινήστε με 4 ώρες χρήσης και σταδιακά αυξήστε στο μέγιστο χρόνο που προτείνει ο επαγγελματίας οφθαλμικής υγείας που σας παρακολουθεί. Ο επαγγελματίας οφθαλμικής υγείας που σας παρακολουθεί μπορεί να προτείνει εξατομικευμένο πρόγραμμα χρήσης για εσάς.

• Δεν πρέπει ΠΟΤΕ να κοιμάστε με τους SynergEyes φακούς σας.

• Σιγουρευτείτε να καθαρίζετε τους φακούς σας καθημερινά:

1. Κάθε μέρα μετά την αφαίρεση των φακών σας, πρέπει να τους καθαρίζετε πριν τη βραδινή αποθήκευση.
2. Για το ξέπλυμα των φακών σας χρησιμοποιείτε φυσιολογικό όρο χωρίς συντηρητικά όπως το Unisol 4 (Newsept). **Ποτέ μη ξεπλύνετε ή αποθηκεύσετε τους φακούς σας με νερό βρύσης.**
3. Τοποθετήστε το φακό με το κοίλωμα προς τα πάνω στην παλάμη σας και χρησιμοποιήστε μερικές σταγόνες ορού. Με την άκρη των δαχτύλων σας ήπια τρίψτε όλο το φακό με κυκλική κίνηση πάνω στην παλάμη σας. Σιγουρευτείτε να καθαρίσετε ενδελεχώς όλο το φακό και μετά να το ξεπλύνετε καλά με συνεχή ροή υγρού.
4. Για απολύμανση, χρησιμοποιείτε υγρά με υπεροξειδίο του υδρογόνου. Προσεκτικά ακολουθείστε τις οδηγίες του συγκεκριμένου συστήματος απολύμανσης που χρησιμοποιείτε.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο τη θήκη που παρέχεται με τα συστήματα απολύμανσης. Σιγουρευτείτε να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα δισκία ή ταμπλέτες και να αφήνετε τους φακούς στο υγρό για τουλάχιστον 6 ώρες πριν να τους ξαναφορέσετε.
6. Πάντα ανανεώνετε το υγρό όταν αποθηκεύετε τους φακούς σας. Ποτέ μη προσθέτετε επιπλέον ή χρησιμοποιείται παλιό υγρό.
7. Η SynergEyes συστήνει μόνο προϊόντα φροντίδας χωρίς συντηρητικά για χρήση με τους φακούς της για κερατόκωνο.
8. Ακολουθείται πάντα τις οδηγίες του επαγγελματία οφθαλμικής υγείας που σας παρακολουθεί.

• Προτεινόμενη αντικατάσταση:

Κάθε έξι μήνες ή πιο συχνά σύμφωνα με τις εντολές του επαγγελματία οφθαλμικής υγείας που σας παρακολουθεί.

Οδηγίες Επαγγελματία Οφθαλμικής Υγείας:

Προτεινόμενο(α) Σύστημα(τά) Φροντίδας:

Πρόγραμμα Χρήσης	
Ημέρα 1η	
Ημέρα 2η	
Ημέρα 3η	
Ημέρα 4η	
Ημέρα 5η	

Για περισσότερες πληροφορίες για τους SynergEyes φακούς για κερατόκωνο παρακαλώ επισκεφτείτε:

www.TreatKeratoconus.com

Για επιπλέον πληροφορίες εντός Ελλάδας και Κύπρου παρακαλώ επισκεφτείτε: www.alcmaeon.com.gr